



**300x
autoklavierbar**



Inspiratorischer Atemmuskeltrainer

AirFeel IMT



AirFeel IMT

Inspiratorischer Atemmuskeltrainer




**PHTHALATES
& BPA FREE**

**300x
autoklavierbar**



Individuell einstellbarer Widerstand:
6 – 60 cm H₂O



Verbessert und stärkt effektiv die Ausdauer
und Kraft der Einatemmuskulatur



Optional: mit Tracheo-Set oder Maske
anwendbar



inkl. Nasenclip



Einfaches Ablesen der Werte



300x autoklavierbar bis 134 °C
ISO 17665-1 validiert

MD

BEZEICHNUNG

PZN

ARTIKEL-NR.

AirFeel IMT Inspiratorischer Atemmuskeltrainer

14279804

M53120-30

INNOVATIVES ZUBEHÖR

Verwendung
mit Maske



Tracheotomierte Patienten

In Kombination mit einem Winkeladaptter zur Anwendung bei tracheotomierten Patienten geeignet



IMT + OPEP

Für die kombinierte IMT und OPEP-Therapie mit inspiratorischem Atemmuskeltraining und oszillierender Schleimlösung.


Features

AirFeel IMT




Das **AirFeel IMT** ist ein inspiratorisches Muskeltrainingsgerät. Es wurde entwickelt, um die Lungenkapazität zu erhöhen und das Zwerchfell zu stärken. Es hält den Druck unabhängig von der Einatmungsgeschwindigkeit konstant.

Das AirFeel IMT ist für klinische Anwendungen indiziert (z.B. Mukoviszidose, COPD, Asthma, Herzinsuffizienz) und kann auch in Verbindung mit einem OPEP Gerät genutzt werden.

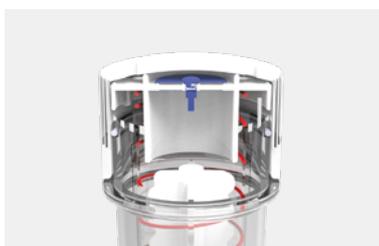

In Ruhestellung drückt die Feder die Ventilkappe nach oben, um einen Luftdurchfluss zu verhindern.

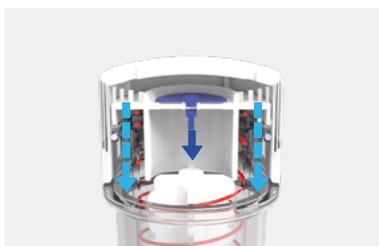

Wenn der Patient atmet führt der Druck auf das Ventil (blauer Pfeil) dazu, dass die Ventilkappe (hellblauer Pfeil) durch die Luft nach unten geschoben wird und so entweichen kann.

Der Druck kann durch Drehen der Kappe eingestellt werden. Dies komprimiert oder entspannt die Feder.

